


がん対策には、 自分を知ることが大切です。

食道がん

ESOPHAGEAL CANCER

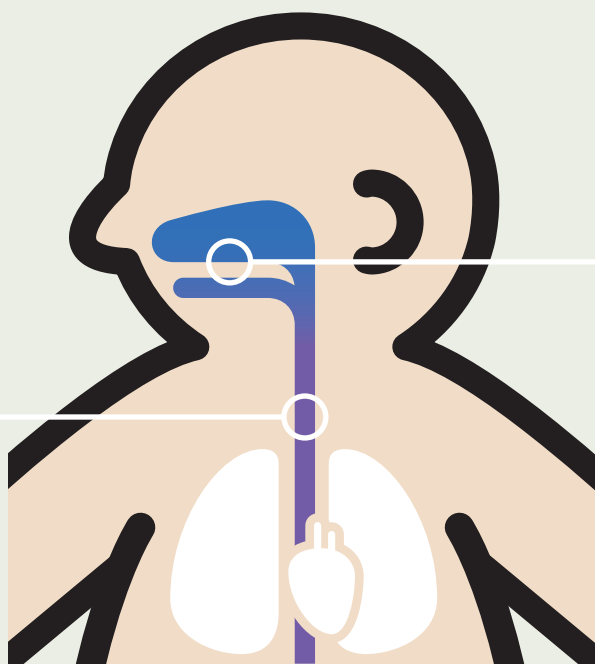

頭頸部がん

HEAD AND NECK CANCER

食道がん・頭頸部がんの、現在の発症リスクを調べます。
生活習慣の改善提案の他、内視鏡検査を勧めるきっかけにも。

アルコリスク®検査について

簡単な検査

1回の採血と
問診のみ

検査後の生活習慣

リスクがある場合、飲酒量や
食道がん・頭頸部がん検診を意識

体質・生活習慣と食道がん・頭頸部がんの関係

口から食道にかけての唾液や粘膜において、アルコールやアセトアルデヒドの分解速度には個人差があり、発がん物質であるアセトアルデヒドが残りやすい体質の方がいます。(図1)
そして、アルコール分解速度に関する体質と、飲酒量や喫煙により、がん発生のリスクが高くなることが知られています。(表1)


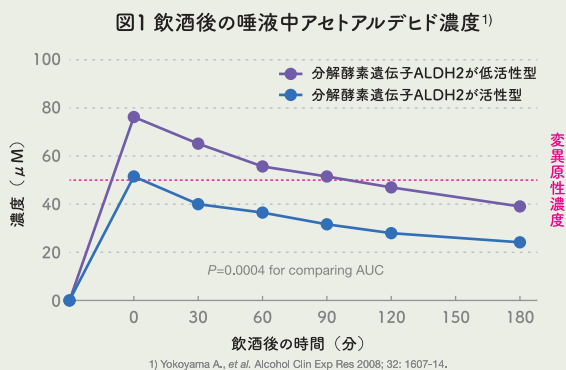


表1 ADH1B低活性型+ALDH2低活性型と
飲酒喫煙の組合せによる食道がんリスク

論文	症例数 (症例/対照)	組合せる 飲酒喫煙習慣	オッズ比
Yokoyama A. et al. <i>Carcinogenesis</i> 2002	234/634 (日本)	週396g (18合) 以上の飲酒	414
Lee et al. <i>Int J Cancer</i> 2008	406/656 (台湾)	1日30g (350mlビール2缶) 以上の飲酒	382
Cui et al. <i>Gastroenterology</i> 2009	1070/2836 (日本, GWAS)	週96.5g (350mlビール7缶) 以上の飲酒+喫煙	189
Tanaka et al. <i>Gut</i> 2010	1071/2762 (日本, GWAS)	飲酒+喫煙	357

アルコリスク®検査

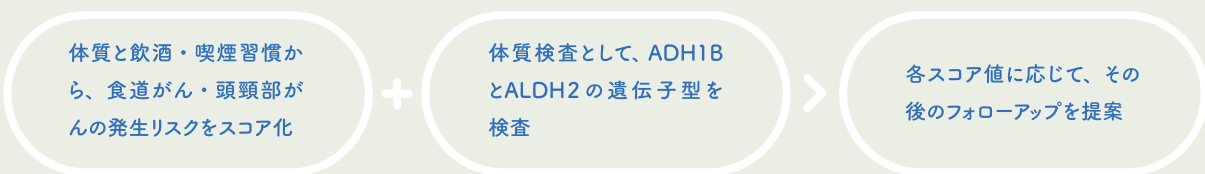

監修：国立病院機構 久里浜医療センター 臨床研究部長 横山頭 先生

このような患者におすすめです

- 飲酒歴・喫煙歴が長く、内視鏡検査を受けたことがない方（結果次第で、内視鏡検査を受けるキッカケにも）
- 家系に食道がん・頭頸部がんになった人がいる方

検査要項

検査項目	検体量	容器	検体保存温度	所要日数	検査方法
アルコリスク®検査	血液2.0mL×1本	EDTA採血管	冷蔵	20～30日	リアルタイムPCR

【注意】 この検査は診断を行うものではありません。また、検査で得られたゲノム情報を、検査以外の目的で使用することはありません。

お問い合わせ

KUBIX

株式会社キュービクス

〒920-2161 石川県白山市熱野町ハ8-1

TEL: 076-201-8821 FAX: 076-272-2488 [平日 9:00～18:00]

<https://www.kubix.co.jp>